

Maxi Sky 440



Nettoyer et désinfecter avant chaque nouveau patient et en cas de suspicion de contamination.

Nettoyer

1. Utiliser un chiffon imbibé d'eau pour éliminer tout excès de résidus du lève-personne et de ses accessoires en procédant de haut en bas.
2. Utiliser un linge imbibé d'une solution d'eau chaude et de détergent doux.
3. Frotter l'équipement de haut en bas, en enlevant tous les résidus visibles.
4. Rincer avec de l'eau propre tout résidu de détergent restant.
5. Essuyer avec un chiffon sec.

ATTENTION

Ne pas éclabousser, tremper ni immerger le lève-personne dans l'eau. Le lève-personne est un dispositif électrique ; l'eau peut donc endommager l'unité.

Afin que les roues du chariot roulent sans problèmes, nettoyer l'intérieur du rail au minimum tous les 4 mois. Pour cela, insérer un chiffon humide dans l'ouverture et le faire glisser d'une extrémité à l'autre du rail.

Les zones indiquées sont plus susceptibles de contenir des saletés et des microbes ; attention aux points suivants :

- Connexion du boîtier en plastique
- Poche de la télécommande
- Cavités en plastique
- Coins du boîtier
- Bord de l'étiquette du produit
- Socles en caoutchouc
- Bord de la membrane
- Cavité arrêt urgence
- Cavité à vis
- Connexion du boîtier
- Ouverture des sangles

Désinfection

6. Essuyer le Maxi Sky 440 et ses accessoires avec une solution contenant un des désinfectants compatibles.
7. Frotter énergiquement l'appareil à l'aide des lingettes pour obtenir une désinfection efficace sur toute la surface.
8. Ne pas utiliser de phénol, de chlore ou autre type de solvant susceptible de nuire à la finition de l'appareil.